



VSO-netwerk

www.vsonetwerk.nl

VSO-Papendal
Arnhem
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
Tel: 026 4834440
info@vso-papendal.nl

VSO-Boxtel
Boxtel
Den Drossaard 9
5282 MK Boxtel
Tel: 0411 674447
info@vso-boxtel.nl

VSO-Tilburg
Tilburg
Benatzkystraat 38
5011 ED Tilburg
Tel: 013 5470257
info@vso-tilburg.nl

Medicort-VSO
Utrecht
J.C. Maylaan 6
3526 GV Utrecht
Tel: 030 2443324
info@medicort-vso.nl

Spanjersberg-VSO
Ridderkerk
Oosterparkweg 35a
2985 SX Ridderkerk
Tel: 0180 435395
info@spanjersberg-vso.nl

Spanjersberg-VSO
(David Lloyd Sport &
Health Club Amsterdam)
Overtoom 557
1054 LK Amsterdam
Tel: 020-4895615
aboont@spanjersberg-vso.nl

Spanjersberg-VSO
(David Lloyd Sport &
Health Club Veldhoven)
Peter Zuidlaan 30
5502 NH Veldhoven
Tel: 040-2953370
aboont@spanjersberg-vso.nl

Spanjersberg-VSO
(Jawi Sportcentrum)
A van Leeuwenhoek 27b
2408 AL Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-497599
aboont@spanjersberg-vso.nl



© VSO Netwerk



Gebruiksaanwijzing voor individueel vervaardigde steunzool

Informatie

1. Inzet en gebruik

- Uw steunzool is een hulpmiddel dat individueel voor u vervaardigd is.
- Verwijder indien mogelijk de originele zolen van de schoenen.
- Leg uw steunzool alleen in daarvoor geschikte schoenen, een langzame gewenning van de voeten kan noodzakelijk zijn.
- Bij rode plekken op de huid of drukplekken graag contact met ons opnemen.

2. Schoen en steunzooltype

- Om de gewenste werking te bereiken moeten schoen en steunzool op elkaar afgestemd zijn.
- Een goede pasvorm van de schoen resulteert in een succesvolle verzorging.
- Let op een goede pasvorm van de hiel bijvoorbeeld door veters of klittenbandsluiting.

3. Schoonmaak en onderhoud

- Om te luchten worden de steunzolen uit de schoenen genomen om langzaam te drogen.
- Met kunststof en microvezel bedekte steunzolen kunnen met een vochtige doek afgewreven worden.
- Doordat wij met MPG geteste materialen (voldoet aan de Europese voorschriften voor medische producten) werken, zijn allergische reacties uitgesloten. Mochten deze alsnog optreden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.
- De steunzolen mogen niet boven de 50°C verhit worden.
- Laat uw steunzolen minimaal één keer per jaar, kinderen elk half jaar, bij ons controleren om mogelijke slijtage met betrekking tot ondersteuning en demping te herkennen.

4. Overig

- Elke benodigde aanpassing binnen een half jaar na aanschaf is bij de prijs inbegrepen. Controle is altijd service.
- Na twee weken moeten de zolen vertrouwd aanvoelen.
- Na 6 weken, of eerder, moet u verbetering merken.
- Mocht de zool iets te lang zijn en niet in de schoen passen, kunt u hier eenvoudig aan het einde een randje van afknippen
- Wanneer de steunzolen goed bevallen en u gebruikt ze intensief, dan raden wij u aan een tweede paar te laten maken. Uiteindelijk gaan ze daardoor langer mee.



VSO-netwerk
www.vsonetwerk.nl

Powered by

Insole-King
www.insole-king.com